

RNDr. Petr Štolba
soudní znalec
IČ: 86656589

ANONYMNÍ URČENÍ OTCOVSTVÍ - ODBĚR VZORKU PRO VYŠETŘENÍ

Použijte dodaný tampon pro jednu osobu.

Přibližně 1-2 hodin před odběrem by testovaná osoba neměla konzumovat žádné jídlo ani nápoje (kromě vody).



Odběr pro DNA testy k určení otcovství se provádí nylonovým tamponem. Odběr je bezbolestný a lze jej provést i velmi malému dítěti.

Nedotýkejte se vlastního tamponu – můžete jej kontaminovat cizí DNA, tampon by také neměl mít kontakt s nesterilním povrchem, biologickým materiálem jiné osoby. Před samotným odběrem si vypláchněte ústa.



Stěr se provádí na sliznici dutiny ústní / z vnitřní strany tváře. Tamponem aspoň 10krát otřete sliznici a přitom pokaždé pootočte tamponem. Účelem je získat epitelové buňky, z nichž lze izolovat DNA pro Váš test. Pro anonymní určení otcovství stěr provádí žadatel sám sobě i dítěti, popř. i partnerovi.

Pozor!

Naslinění tamponu samo o sobě nestačí – je nutné setřít 10krát vnitřní stranu tváře.



Po odběru nechte tampon oschnout aspoň 2 hodiny a vraťte do transportní tuby. Tuby označte – otec, matka, dítě (může také přijít iniciály pro kontrolu). Následně zabalte tampony spolu s odběrovým protokolem do obálky a zašlete poštou na udanou adresu.